



Gebruiksklare sneldesinfectie van medische hulpmiddelen en algemene oppervlakken op basis van alcohol.

## mikrozid<sup>®</sup> AF wipes

### Onze pluspunten

- gebruiksklaar
- in verschillende formaten doekjes verkrijgbaar
- zeer breed werkingsspectrum met korte inwerk tijden
- geen strepen of residu / snelle droging
- aldehydevrij
- geregistreerd bij de Ctgb als PT2 biocide (desinfectie van oppervlakken)
- toelatingsnummer 14020 N

### Toepassingsgebied

Alcoholische sneldesinfectie voor medische hulpmiddelen [CE 0297] en algemene oppervlakken. Geschikt voor alle gebieden met verhoogd besmettingsrisico en voorkeur voor snelle inwerk tijden zoals bijvoorbeeld:

- eenheden waar patiënten behandeld worden
- onderzoekstafels
- OK-tafels en aangrenzende werkvlakken
- oppervlakken van medische apparatuur
- algemene (kleine) oppervlakken

### Gebruiksaanwijzing

#### A. NL WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT ALS BIOCIDE

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels op harde oppervlakken (incl. apparaten en materialen) in

- ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
- de gezondheidszorg;
- productie ruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie,

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

De dosering en inwerk tijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

#### B. GEBRUIKSAANWIJZING ALS BIOCIDE

Algemeen: Mikrozid AF wipes is een gebruiksklaar product en is bestemd voor desinfectie van harde oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, in een medische omgeving en in een kritische/sensibele productie omgeving (productie van farmaceutica en cosmetica).

Toepassing: De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bevochtig de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerk tijd volledig bevochtigd blijven. Het product verdampt volledig. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Dosering: gebruik zoveel mikrozid AF wipes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerk tijd nat blijven - 1 doekje is geschikt voor maximaal 0,38 m<sup>2</sup> oppervlak. Minimale inwerk tijd: 1 minuut.

Waarschuwing: Ontvlambaar, houd verwijderd van open vuur.

**GEBRUIK MEDISCH HULPMIDDEL:** niet geschikt voor het desinfecteren van invasieve medische hulpmiddelen.



## Productinformatie

Samenstelling:  
100 g oplossing bevat: Werkzamestof 25 g Ethanol (94 %), 35 g. Propan-1-ol

### Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid	circa 0,89 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Kleur	kleurloos
pH	Niet van toepassing
Viscositeit, dynamisch	Niet uitgevoerd
Vlampunt	27 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Vorm	vloeibaar

## Speciaal advies

Oogcontact vermijden. Alcohol gevoelige oppervlakken (zoals bijvoorbeeld acrylglas) niet met dit product behandelen. Voor een alternatief product verwijzen wij u naar de mikrozid<sup>®</sup> sensitive range. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies.

## Accessoires

Accessoires	Artikel nr.
Wandhouder voor mikrozid bussen	134417
Wandhouder voor mikrozid jumbo bussen	134421

## Verwante producten

- mikrozid<sup>®</sup> PAA wipes
- mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

## Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij hanteren hoge kwaliteitseisen.

## Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de mikrozid<sup>®</sup>AF producten is terug te vinden op internet via website [www.schuelke.nl](http://www.schuelke.nl).

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor: 0031(0) 23 535 26 34 of internationaal 0049 (0)40 521 00 666



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.