



Alcoholvrije sneldesinfectie van medische hulpmiddelen en algemene oppervlakken op basis van quaternaire ammoniumverbindingen.

mikrozid[®] sensitive wipes

Onze pluspunten

- alcoholvrij
- snel en breed werkingsspectrum
- met name voor alcoholgevoelige oppervlakken
- gebruiksklaar
- geregistreerd bij het Ctgb als PT2 biocide (desinfectie van oppervlakken)
- toelatingsnummer 13744 N

Toepassingsgebied

Voor de desinfectie van medische hulpmiddelen en toebehoren [CE 0297] en algemene oppervlakken. Bijzonder geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken (waaronder plexiglas en ultrasoon toebehoren). Niet gebruiken op (onbehandelde) oppervlakken (o.a. metalen) die gevoelig zijn voor water (i.v.m. kans op roestvorming).

Dosering en gebruik

mikrozid[®] sensitive tissues gebruiken om oppervlakken af te nemen daarbij de aangegeven inwerktijd aanhouden. Voor gebruik op grote oppervlakken eventueel meerdere tissues gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT ALS BIOCIDEN voor NL

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen op oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg, met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor. Het gebruik en de inwerktijd van het middel zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING ALS BIOCIDEN voor NL:Algemeen:

Met name geschikt voor toepassing op oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol.

Toepassing: mikrozid[®] sensitive wipes is een ready to use product. Veeg oppervlak grondig af. Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven - 1 doekje bevat 2.9 ml desinfectievloeistof en is geschikt voor maximaal 0,5 m² oppervlak. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken. Dosering: Gebruik zoveel mikrozid[®]sensitive wipes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Minimale inwerktijd: 1 minuut voor bestrijding van bacteriën en gisten / 5 minuten voor bestrijding van virussen.

GEBRUIK MEDISCHE HULPMIDDELEN: Niet geschikt voor einddesinfectie van semikritische en kritische medische hulpmiddelen. Veeg oppervlak grondig af. Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. mikrozid[®]sensitive wipes is een ready to use product. Controleer of het product met betrekking tot de antimicrobiële werkzaamheid geschikt is voor de beoogde toepassing.

Inwerktijd: 1 minuut voor bestrijding van bacteriën en gisten / 5 minuten voor bestrijding van omhulde virussen (HBV / HCV / HIV). Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.



mikrozid[®] sensitive wipes

Productinformatie

Samenstelling:

100 g mikrozid[®] sensitive oplossing bevat de volgende werkzame bestanddelen.

0,26 g Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride; 0,26 g didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, chloride

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid	circa 1 g/cm ³ / 20 °C
Kleur	kleurloos
pH	6 - 8 / 20 °C / concentraat
Viscositeit, dynamisch	Niet uitgevoerd
Vlampunt	Niet van toepassing
Vorm	vloeibaar

Expert reports en informatie

Rapporten en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de mikrozid[®]sensitive producten is terug te vinden op internet via www.schuelke.nl.

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor : 0031 (0)23 5352634 of internationaal 0049 (0)40 521 00 666.

Speciaal advies

Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen. Etikettering overeenkomstig EG-richtlijnen. Zie veiligheids informatieblad. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies.

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
mikrozid sensitive wipes -NL- 200 ST DS	10/Doos	165706
mikrozid sen. wipe -Ref-NL- 12x200 ST KT	1/Doos	165707

Accessoires

Accessoires	Artikel nr.
Wandhouder voor mikrozid jumbo bussen	134421

Verwante producten

- mikrozid[®] AF wipes
- mikrozid[®] PAA wipes

Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij houden hoge kwaliteitseisen in acht.



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.



Een onderneming van de Air Liquide Groep

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70
www.schuelke.com
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax: +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com